



Het risico op infectie  
zichtbaar beheersen

**Leukoplast®**  
Wound care in best hands

# Transparante controle voor optimale wondgenezing

**Na een chirurgische ingreep heeft de wond observatie nodig. Infecties moeten snel herkend worden om, indien nodig, vroegtijdig maatregelen te kunnen nemen.**

Dankzij de transparante folie en innovatieve hydropolymeer technologie is een wondinspectie met Leukomed® Control te allen tijde mogelijk zónder verbandwissel\*. Zo wordt het risico op een wondinfectie verlaagd en het ontstaan van een infectie snel gesignaleerd. Dat vermindert de intensiteit van de behandeling en de wondgenezing wordt niet belemmerd.

**\*Leukomed Control kan tot 7 dagen blijven zitten!**



**Duidelijke zichtbaarheid van de wond**



**Vroege signalering van infectie**




**Bescherming tegen bacteriën**

## Transparante, plooibare folie

- Maakt vaststellen zichtbare tekenen van infectie mogelijk
- Kan onnodige verbandwissels helpen voorkomen

## Water- en bacteriebestendige folie

- Beschermt de wond tegen binnendringen van vocht, vuil en bacteriën
- Geschikt om mee te douchen

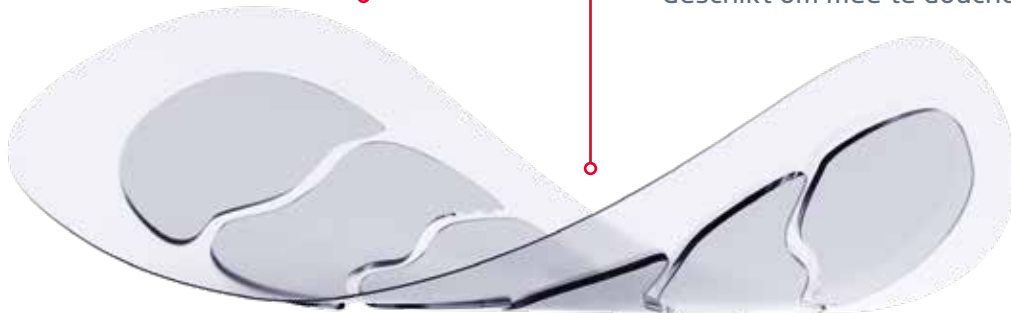

## Huidvriendelijke kleeflaag

- Brede kleefranden voor betrouwbare fixatie
- Makkelijk te verwijderen


## Absorberende hydropolymeer gelmatrix

- Gecontroleerde absorptie van wondvocht ondersteunt wondgenezing
- Door ontwerp zeer plooibaar

# Aanbrengen

## Leukomed® Control

---

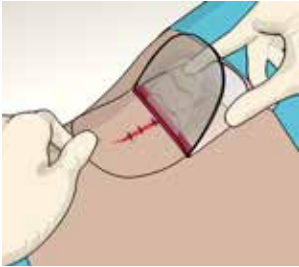

1. Verwijder het grootste transparante schutblad aan de onderkant van het verband. Breng het wondverband zo aan dat de gelmatrix de wond bedekt.



2. Verwijder het kleine witte schutblad (of twee witte schutbladen bij de grotere formaten) aan de onderzijde. Wrijf vervolgens de borderrand aan zodat de randen goed vastkleven en niet plooiën.



3. Verwijder voorzichtig de bovenste schutbladen met behulp van de rode strips.



4. Observeren van de wond is mogelijk zonder het verband te verwijderen.

# Verwijderen

## Leukomed® Control

---



1. Maak voorzichtig een hoekje los.



2. Rek de folie evenwijdig aan de huid uit en verwijder het verband voorzichtig van de wond.



Bekijk ook de korte instructiefilm over Leukomed® Control op ons YouTube-kanaal

# Bestelinformatie

---

Leukomed® Control				
Artikelnummer	Afmeting	Afmeting wondkussen	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
73230-00	5 x 7 cm	2 x 4 cm	10	28
73230-01	7 x 10 cm	4 x 7 cm	10	20
73230-02	8 x 15 cm	4,5 x 11,5 cm	10	20
73230-03	10 x 24 cm	6 x 20 cm	5	20
73230-05	10 x 35 cm	6 x 31 cm	5	10



Leukoplast®,  
an Essity brand



02812229M



Wound care in best hands